

Richtige Anwendung des Lebensweckers mit methatec® - Einmalmaterial

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Lebenswecker, einen sterilen Einmal-Nadelkopf und einen sterilen Einmal-Silikonschutz vorbereitet haben – Achtung – hygienisches Arbeiten mit Handschuhen und Hautdesinfektionsmittel ist zwingend erforderlich!



2. Schrauben Sie die Schutzkappe und die Tiefeneinstellung ab und setzen Sie den zuvor aus dem Blister ausgepackten Einmal-Nadelkopf ein. Ziehen Sie zuvor die Schutzkappe von den Nadeln ab



3. Schrauben Sie nun die Tiefeneinstellung auf – Achtung – auf Grund der Wandungsstärke des Silikonschutzes, muss das Gerät ca. 1 mm tiefer eingestellt werden als gewohnt



4. Nehmen Sie nun den Einmal-Silikonschutz aus dem Blister und spannen Sie den flexiblen Silikonschutz über die Öffnung, wo die Nadeln herausschnellen.



5. Stellen Sie bitte sicher, dass die ausgestanzte Öffnung des Silikonschutzes mittig über der Öffnung für die Nadeln liegt und dass der Silikonschutz ganz nach hinten aufgezogen wurde



6. Durch Hinaufdrücken des Spannhels können Sie überprüfen, wie weit die Nadeln über den Rand des Silikonschutzes hervorsteht.

