

methatec Gesellschaft für Praxisbedarf mbH + Co., Handels KG	Bedienungsanleitung OPTION Dachstellung methatec luX, 3tlg.	Index: 1 Seite: 1-2
---	--	------------------------

Die Behandlungsliege methatec luX, 3tlg. Kann auch mit der motorisch verstellbaren Dachstellung erworben werden.


Bitte beachten Sie diese zusätzliche Anleitung!

Ihre Behandlungsliege ist ausgestattet mit Handschalter, Fußschalter oder Rundumschaltung.

In dem Fall, daß die Liege mit einem Fußschalter oder einer Rundumschaltung ausgestattet ist, erhalten Sie zusätzlich einen Handschalter, der für die Dachstellung benötigt wird. Falls die Behandlungsliege mit Handschalter ausgestattet ist, hat dieser Handschalter 4 Tasten, 2 für die Höhenverstellung und 2 für die Dachstellung.

Dachstellung

Um die Dachstellung zu nutzen, müssen Sie das Kopfteil vorher negativ einstellen damit es beim Patienten nicht zu einer Überstreckung in der Halswirbelsäule kommt. Wenn der Patient dann positioniert ist, kann mittels Handschalter das Dach (1) sanft eingestellt werden.

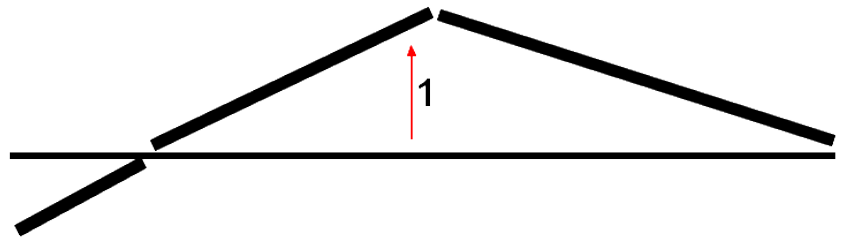


LWS-Traktion

Weiter haben Sie die Möglichkeit mit dieser Multifunktionsliege eine Traktion im LWS-Bereich zu machen unter zur Hilfenahme des körpereigenen Gewichts des Patienten.


Stellen Sie dazu das Kopfteil (1) negativ ein. Der Patient liegt auf dem Rücken und wird mit Fußmanschetten am Extensionsgalgen—welcher an der Beinplatte (3) montiert ist—fixiert.

Mit dem Handschalter wird nun die Dachstellung angefahren, wobei sich die Rückenplatte (2) anhebt. Zeitgleich verstellt der Therapeut die Beinplatte (3) mit Unterstützung der Gasfeder in positiver Richtung. Dieses ergibt eine schiefe Ebene, wodurch der Patient durch körpereigenes Gewicht eine Traktion im LWS-Bereich herbeiführt.

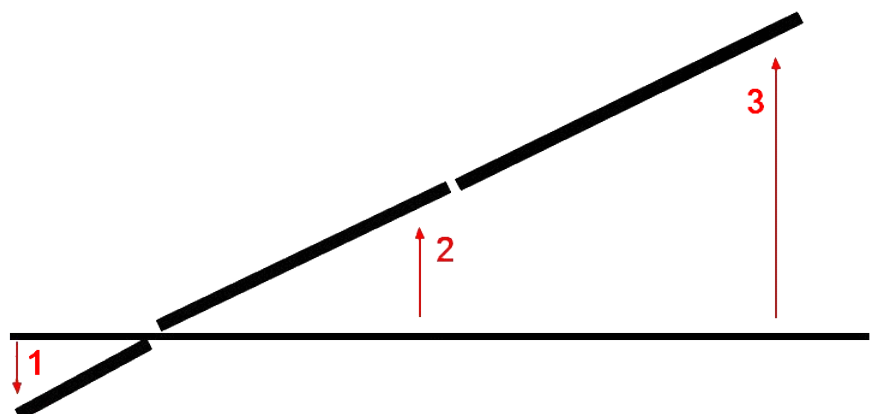

HWS-Traktion

Für die WS-Traktion verstellen Sie das Kopfteil (1) in 90° negative Position. Das Beinteil (3) dient in diesem Fall als Rückenteil. Der Patient setzt sich auf die Behandlungsliege. Der Kopf wird mit einer Glissonschiene an dem Extensionsbügel (4) fixiert.

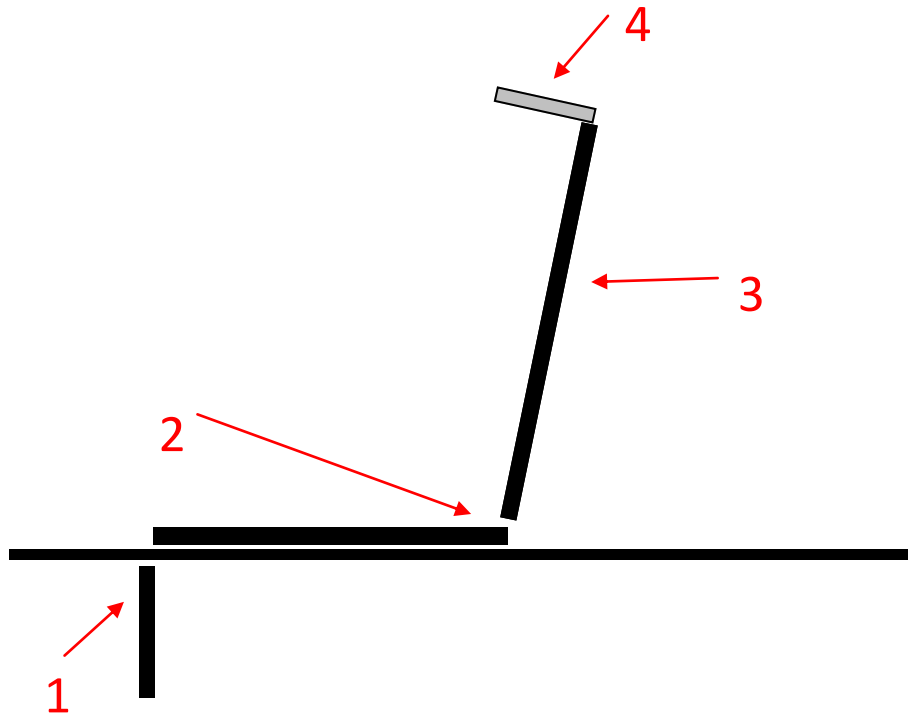

Mit dem Handschalter kann man nun die Dachstellung einstellen. Dabei wird die Rückenplatte (2) in der Höhe verstellt woraus resultiert, daß die Beinplatte (3) zusammen mit dem Extensionsgalgen (4) und der Glissonschiene nach oben verstellt wird. Daraus ergibt sich eine Traktion im HWS-Bereich.

